

Sistema CAM
Cobertura Antiviral para Macas

ARIEequipment



A Cobertura CAM minimiza a transferência de agentes patogênicos entre pacientes, socorristas, equipamentos e o meio ambiente.

- Estrutura em Alumínio e Aço Inox
- Dobrável para fácil arrumação
- Compacto para fácil transporte
- Material não afectado por desinfectantes
- Fácil de limpar
- PVC Super clean para permitir monitorizar o paciente constantemente
- 4 pontos de fixação

Dimensões Aberto:


1940 x 865 x 564 mm

Dimensões Fechado (em saco):

980 x 600 x 120 mm


Peso:

8,5kg

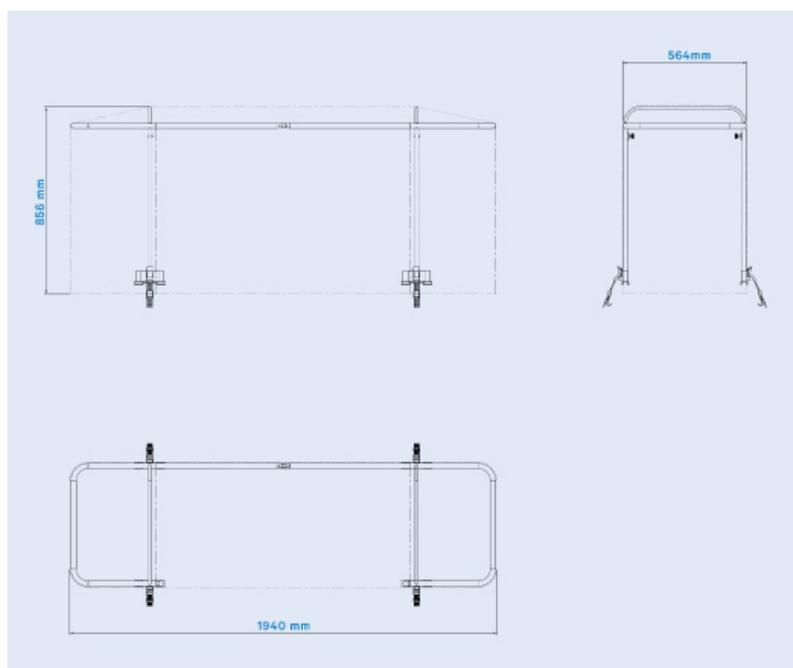

Incluído:

- a-1 Saco para Transporte
- b-1 Cobertura PVC
- c-1 Tubagem Superior
- d-2 Suportes Superiores
- e-4 Suportes Verticais

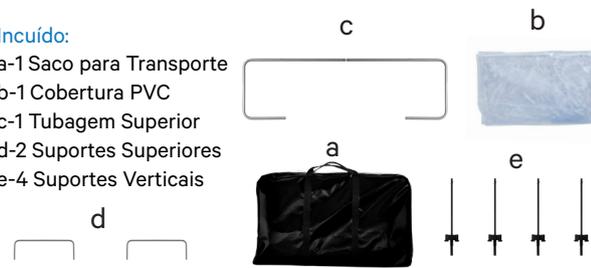

Compatível com as macas:

AREquipment: M760, M761; M764; M860

Ferno: F2

Manual de montagem do CAM



1. Primeiramente é necessário que sejam fixados os 4 suportes incluídos no kit CAM (fixar com a abraçadeira de ajuste), estas assentam nos perfis de alumínio da estrutura principal da maca;



2. Em seguida, alinhar a tubagem superior do CAM, devemos ter em atenção à posição dos 4 para pousar sem esforço nos mesmos.



3. Proceder ao alinhamento da tubagem superior com os suportes e montar os 2 suportes superiores.



4. Após montada a estrutura e verificada a sua posição podemos então colocar a cobertura CAM, esta deverá ser colocada de cima para baixo, para que assente corretamente na estrutura.

