



Colete Pediátrico

COLETE

IFU-COLETE-PEDIATRICO-REV.01

DATA DE EDIÇÃO: 09/09/2024
DATA DE REVISÃO: 03/09/2025
REVISÃO: 01

INDÍCE

Relação com o Cliente ----- 3

Contactos ----- 3

Notificação de Propriedade ----- 3

Aviso Legal ----- 3

Condições da Garantia Limitada ----- 3

Aviso de Reações Adversas ----- 3

Recomendação de Segurança ----- 4

Colete Pediátrico ----- 5

Colete Pediátrico Dados Gerais ----- 6

Modo de Funcionamento/Utilização ----- 7

Instalação e Fixação ----- 8

Manutenção ----- 9

Lubrificação ----- 9

Lista de Pontos a Verificar ----- 10

Desinfecção/Limpeza ----- 11

Advertências ou Precauções a tomar na Eliminação Segura do Dispositivo ----- 12

Registo de Formação ----- 13

Registo de Manutenção ----- 14

Relação com o Cliente

Para assistência na encomenda ou informações gerais:

Contactos

Auto Ribeiro, Lda. - Rua S. Caetano, 551
4410 - 494 Canelas
Vila Nova de Gaia, Portugal.

Telefone: (+351) 227 157 100

Website: www.arehousement.com

Condições da Garantia Limitada

Os produtos Auto Ribeiro estão abrangidos por uma garantia limitada, cujos termos e condições constam da documentação fornecida no momento da compra. Informação completa sobre a garantia e respetivas limitações pode ser solicitada diretamente ao Serviço de Apoio ao Cliente da Auto Ribeiro.

Aviso de Reações Adversas

Em caso de evento adverso ou incidente grave relacionado com a utilização deste produto, o utilizador deve reportar o sucedido à Auto Ribeiro. Para efetuar a comunicação diretamente à Auto Ribeiro, utilize os canais de contacto indicados neste manual.

Notificação de Propriedade

A informação apresentada neste manual é propriedade da Auto Ribeiro e/ou dos seus parceiros autorizados. A Auto Ribeiro reserva todos os direitos relativos à propriedade intelectual, conceção exclusiva, fabrico, reprodução e comercialização do produto e das informações nele contidas, salvo se expressamente cedidos a terceiros.

Aviso Legal

Este manual contém instruções gerais de utilização, funcionamento e manutenção do produto, não sendo exaustivo. A utilização segura e correta é da exclusiva responsabilidade do utilizador. As informações de segurança servem apenas como orientação, sendo obrigação do utilizador cumprir as normas e protocolos aplicáveis. É essencial realizar formação adequada antes da utilização em contexto real. Guarde este manual e assegure que acompanha o produto em caso de transferência. Cópias adicionais podem ser solicitadas ao Serviço de Apoio ao Cliente.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO



Diretrizes Importantes de Segurança

Siga as instruções fornecidas para garantir uma operação segura.

Riscos biológicos – Efetue limpezas regulares para reduzir o risco de contaminação.

A utilização de peças ou serviços não autorizados pode provocar acidentes ou falhas no equipamento.

Assegure que apenas sejam utilizados componentes e serviços aprovados pela Auto Ribeiro para manutenção e reparações. Utilize igualmente apenas acessórios aprovados pela Auto Ribeiro, garantindo assim a segurança e funcionalidade do produto.

O operador deve possuir experiência na utilização do equipamento e conhecimentos básicos de primeiros socorros. Durante a utilização, deve seguir rigorosamente as instruções; caso contrário, a empresa não se responsabiliza por eventuais riscos.

Os avisos indicam situações potencialmente perigosas.

É estritamente proibida a operação ilegal ou incorreta, assim como a sobrecarga, para evitar danos causados pelo uso inadequado do equipamento.

Desinfecção / Limpeza

Utilize detergentes/desinfetantes compatíveis.

Ao limpar, verifique cuidadosamente a concentração recomendada pelo fabricante para evitar danos nos materiais do equipamento.

Enxague com uma quantidade limitada de água, seque o máximo possível

Se o equipamento for utilizado em ambientes agressivos (ex.: ambientes salinos), recomenda-se realizar ciclos diários de lavagem e lubrificação para proteger as partes expostas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso de produtos de limpeza inadequados que possam deteriorar os materiais das superfícies.

NOTIFICAÇÃO

Notificações realçam informações importantes, mas que não estão relacionadas com riscos.

Colete Pediátrico



Colete Pediátrico

Sobre

O Colete Pediátrico é um sistema que permite adaptar o convencional sistema de segurança de transporte para o transporte pediátrico. Este produto é totalmente desenvolvido pela Auto Ribeiro.

Este sistema de retenção adapta-se rapidamente a qualquer cama de transporte para o transporte seguro de crianças.

A sua estrutura foi desenvolvida de raiz com materiais de elevada resistência, pensada para garantir robustez, estabilidade e durabilidade em contextos exigentes.

Distingue-se pela sua versatilidade, qualidade de construção e acabamento cuidado.

Características Técnicas

- Contenção segura para transporte;
 - Compacto para armazenamento;
 - Rápida libertação dos pacientes;
 - Sem ignição progressiva ou ignição flamejante testado de acordo com EN 597- 1:1994;
 - Os materiais não ficam danificados pelos desinfetantes;
 - Fácil de limpar.
- Peso: 990 g
- Garantia: 2 anos

MODO DE FUNCIONAMENTO/UTILIZAÇÃO



Vista Traseira - Cintas laterais para fixação sob a cabeceira.



Vista Principal - Totalmente ajustável com arnês de cinco pontos.

INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO



MANUTENÇÃO

- O equipamento necessita de manutenção regular para manter um correto funcionamento;
- Deve seguir um plano de manutenção regular para evitar falhas;
- Faça registos de manutenção do seu equipamento;
- Use peças de reposição originais e recomendadas pelo seu fabricante;
- Leia os dados de segurança do fabricante de cada produto.

A tabela seguinte apresenta intervalos mínimos recomendados de manutenção ao seu equipamento.

Desinfecção	Limpeza	Inspeção	Lubrificação
Em cada utilização	Em cada utilização Quando necessário	3 meses	Não aplicável

LISTA DE PONTOS A VERIFICAR

- Verifique se todos os componentes estão no equipamento;
- Verifique se existe algum desgaste excessivo ou anormal;
- Verifique se o equipamento tem os componentes do cinto instalados corretamente;
- Verifique se os cintos estão em bom estado, sem cortes ou arranhões;
- Verifique se os encaixes dos cintos funcionam corretamente.

Não utilize jatos de água.

Não utilizar para limpeza detergente/desinfetante que tenham como componente Hipoclorito de Sódio.

DESINFECÇÃO/LIMPEZA

1. Desinfecção/Limpeza do cinto

- Limpe e desinfete o cinto com detergente/desinfetante compatível conforme as indicações de concentração sugerida pelo fabricante;
- Limpe com água morna em quantidade reduzida, seque o máximo possível e volte a aplicar no equipamento conforme indicações no manual de instruções.

2. Inspeção

- Deve seguir um plano de inspeção regular para evitar falhas no equipamento, para não colocar em risco a segurança do paciente e dos operadores;
- É necessário verificar as peças usadas para fins de imobilização;
- Verificação do aperto dos elementos de conexão. Faça ajustes, se necessário.

Não utilize jatos de água.

Não utilizar para limpeza detergente/desinfetante que tenham como componente Hipoclorito de Sódio.

ADVERTÊNCIAS OU PRECAUÇÕES A TOMAR NA ELIMINAÇÃO SEGURA DO DISPOSITIVO

O presente dispositivo contém materiais que devem ser eliminados em conformidade com a legislação ambiental local aplicável. A eliminação incorreta pode representar riscos para a saúde pública e para o meio ambiente.

Instruções específicas:

1. Separação de componentes

- **Antes da eliminação, separar os principais materiais.**
- **Reciclagem e reutilização**
 - Sempre que possível, encaminhar os componentes para centros de reciclagem autorizados.

Não eliminar:

Não deite este dispositivo no lixo doméstico ou indiferenciado. O utilizador final é responsável por garantir a eliminação segura, através de operadores autorizados.

Eliminação do dispositivo:

No fim da sua vida útil, a eliminação deve ser feita separando os componentes por tipo de material e encaminhando-os para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados.

O colchão deve ser tratado como resíduo não perigoso, mas deve ser encaminhado segundo as orientações de resíduos hospitalares ou contaminados.

Não eliminar com resíduos domésticos. A eliminação inadequada pode pôr em risco a saúde pública e o ambiente. Para mais informações, consulte a legislação aplicável em vigor ou contacte o fabricante.

REGISTO DE FORMAÇÃO

[illegible]

REGISTO DE MANUTENÇÃO

[illegible]

REGISTO DE MANUTENÇÃO

[illegible]

Colete Pediátrico