

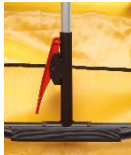





**Manual de instruções:
C600 – Cadeira Ortopédica Desdobrável**

C600 – CADEIRA ORTOPÉDICA DESDOBRÁVEL

A Cadeira ortopédica desdobrável trata-se de um equipamento de accionamento manual, desenvolvida para transporte em locais de difícil acesso. Tem como principal objetivo o transporte de pacientes com mobilidade reduzida. Este produto é desenvolvido e produzido pela Auto Ribeiro Lda..

Sistema de FECHO

Sistema de FECHO	
	1º - Pressione a manete vermelha de segurança.
	2º - Segure na manete vermelha e na estrutura do encosto e feche a cadeira com um só movimento.
Sistema de ABERTURA	
	1º - Abra a cadeira com um só movimento até ouvir um “click”.
Punhos Reclináveis	
	1º - 4 Punhos Reclináveis



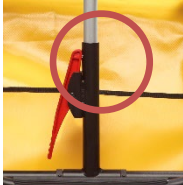

CARACTERÍSTICAS

- Peso: 7,8 kg
- Carga Máxima Admissível: 160kg
- Dimensões (Fechada): 620 x 475 x 250 mm
- Dimensões (Aberto): 915 x 700 x 475 mm

ACESSÓRIOS

	Cinto de fixação para cintura e pernas
	Cintos de transporte
	Alça de transporte

AVISOS DE SEGURANÇA

	<p> Este equipamento pode tornar-se perigoso:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Perigo de Entalamento<input type="checkbox"/> Equipamento está dotado de um sistema de fecho por mola. <p>ATTENTION: USED ONLY BY QUALIFIED PEOPLE</p>
	<p> Verificar se o fecho fica bem trancado antes de colocar o paciente.</p>

MANUTENÇÃO

- Executar inspeção visual a cada cinquenta ciclos de utilização.
- Lubrificação de elementos de funcionamento mecânico semestralmente com lubrificante de viscosidade elevada.
- Verificação de aperto de elementos de ligação trimestralmente. Proceder a ajuste se necessário.



Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugal
Telf: +351 227157100 , Fax: +351 2271244
comercial@arequipment.com
www.arequipment.com

