

**Sistema CAM**  
Cobertura Antiviral para Macas

**ARIE**equipment



A Cobertura CAM minimiza a transferência de agentes patogênicos entre pacientes, socorristas, equipamentos e o meio ambiente.

## Manual de montagem do CAM



1. Primeiramente é necessário que sejam fixados os 4 suportes incluídos no kit CAM (fixar com a abraçadeira de ajuste), estas assentam nos perfis de alumínio da estrutura principal da maca;



2. Em seguida, alinhar a tubagem superior do CAM, devemos ter em atenção à posição dos 4 para pousar sem esforço nos mesmos.



3. Proceder ao alinhamento da tubagem superior com os suportes e montar os 2 suportes superiores.



4. Após montada a estrutura e verificada a sua posição podemos então colocar a cobertura CAM, esta deverá ser colocada de cima para baixo, para que assente corretamente na estrutura.

